

Orto Partner

Rozwiązania dla mobilności

Bezpłatne konsultacje

Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia możliwie najlepszego i najbardziej odpowiedniego serwisu. Nasza dewiza – komfortowo ciesz się życiem.

Adresatem pracowni ortopedycznej Orto Partner mogą być pacjenci, ich rodziny, lekarze, terapeuci, ubezpieczyciele, menedżerowie (w przypadku organów rządowych i innych).

Doskonała współpraca – PARTNERSTWO – naszych klientów i protetyków jest absolutnie niezbędne dla osiągnięcia sukcesu.

Naszymi celami są:

- Wysłuchanie potrzeb
- Dołożenie wszelkich starań w celu rozwiązania wszystkich potrzeb protetycznych
- Staranność, aby wszystkie Państwa pytania nie zostały bez odpowiedzi
- Wyjaśnienie każdego kroku procesu zaopatrzenia
- Omówienie stanu, stylu życia, oczekiwań, hobby, planów na przyszłość, celów i wymagań
- Staranność o zminimalizowanie poziomu lęku
- Rehabilitacja i / lub fizykoterapia (skierujemy Ciebie w odpowiednie miejsce)
- Współpraca z Tobą, Twoim lekarzem/fizjoterapeutą
- Przeprowadzenie szczegółowej oceny Twojego stanu aktywności ruchowej (sprawność kończyn, siła i zakres ruchu)
- Weryfikacja zaopatrzenia i jego zmiana zgodnie z Twoim stanem aktywności

Umów się z nami telefonicznie lub mail-owo i zabierz ze sobą ubrania, które umożliwiają dostęp wizualny do pozostałych kończyn, takie jak krótkie spodnie, spódnicę, krótki rękaw lub górę odsłaniające kończyny. Historia choroby oraz zlecenie na zaopatrzenie ortopedyczne uprości nam procedury związane z projektowaniem procesu zaopatrzenia.

Wykonanie protezy jest bardzo skomplikowanym procesem. Wywiad, dokładny pomiar i odlew formy kończyny są konieczne i dają nam podstawę podczas niestandardowej pracy.

Orto Partner

Rozwiązania dla mobilności

Adres pracowni ortopedycznej: ul. Gdyńska 19, 62-004 Czerwonak,

Tel/fax. 061 812 01 03, kom. 608 65 60 60, 609 660 191

e-mail: info@ortpartner.pl www.ortpartner.pl

Orto Partner

Rozwiązania dla mobilności

Montaż i ustawienie dynamiczne protezy

Cały proces zaopatrzenia może trwać kilka dni lub tygodni, zwłaszcza w przypadku pierwszorazowego zaopatrzenia, nim uzyskamy dobrze dopasowane i funkcjonalne sztuczne kończyny. Protetyk koncentruje się, w pierwszej kolejności na dopasowaniu leja. Jasne – przezroczyste leje testowe z tworzyw sztucznych służą weryfikacji i dają się termicznie formować w okresie zmian kikutu (lej tymczasowy w protezie wstępnej). Protetyk może zobaczyć, gdzie lej jest dobrze dopasowany i gdzie nastąpiły zmiany objętości kikutu podczas użytkowania. Takie rozwiązanie skraca okres adaptacji i poprawia komfort użytkownika protezy. **Zwykle proces ten trwa od jednego do trzech tygodni. Potem przechodzimy do wykonania leja ostatecznego wraz z wykończeniem protezy w ustawieniu dynamicznym.**

Wydanie zaopatrzenia

Po otrzymaniu gotowej protezy, Twój protetyk upewni się, że wiesz jak obsługiwać wszystkie funkcje protezy i przekaże informacje na temat pielęgnacji oraz konserwacji.

Przegląd - kontrola

Zalecamy po około 3 miesiącach przeprowadzenie **bezpłatnej** inspekcji sprzętu ortopedycznego w celu weryfikacji dopasowania, oceny funkcjonowania zaopatrzenia oraz opanowania funkcji protezy/ortezy przez użytkownika. Chcemy mieć pewność, że proteza lub orteza jest wygodna i że pozostaje w dobrym stanie. Jeśli stwierdzimy zmiany anatomiczne (rozmiar ciała lub objętości) lub zmiany w funkcjonalnych umiejętnościach, będziemy dostosować go i/lub zaproponujemy niezbędne modyfikacje.

Zalecamy, aby co najmniej raz na sześć miesięcy skontrolować dopasowanie sprzętu i stan swojego ciała (waga, kształt i objętość kończyn). Jeśli zauważysz zmiany w masie lub poziomie aktywności, poinformuj nas o tym fakcie, a zaproponujemy dalsze postępowanie.

Objętość kończyny może zmniejszyć się w ciągu pierwszych kilku tygodni, zwłaszcza u osób zaopatrzonych pierwszorazowo w konstrukcje aktywne i pełnokontaktowe (lej protezowy, ortezy, dynamiczne elementy funkcjonalne z wł. węglowego)

Sprawdź swoją skórę za każdym razem po zdjęciu protezy/ortezy:

Orto Partner

Rozwiązania dla mobilności

Adres pracowni ortopedycznej: ul. Gdyńska 19, 62-004 Czerwonak,

Tel/fax. 061 812 01 03, kom. 608 65 60 60, 609 660 191

e-mail: info@ortpartner.pl www.ortpartner.pl

Orto Partner

Rozwiązania dla mobilności

- Zmiany chorobowe (np. neuropatie cukrzycowe) oraz pory roku, mają wpływ na stan naszej kondycji i skóry. Należy unikać obtarć, pęcherzy i uszkodzenia skóry.
- Jeśli skóra jest podrażniona, pozwól jej odpocząć, gdy jest uszkodzona nie noś zaopatrzenia, aż do całkowitego uzdrowienia. Zalecamy kontakt z nami.

Wielu użytkowników protez (indywidualna nadmierna potliwość) musi koniecznie zwiększyć częstotliwość pielęgnacji ciała i protezy/ortezy. Jest to zjawisko powszechne, dlatego też zalecamy częstszą zmianę pończoszek kikutowych lub ich odpowiedników.

Koszt

Zaopatrzenie ortopedyczne jest procesem kosztownym zwłaszcza przy refundacji opartej na kalkulacjach z lat 70-tych. Trudno jest oszacować na telefon, ile będzie kosztowało zaopatrzenie bez oceny osoby i weryfikacji potrzeb Użytkownika. Podczas konsultacji określimy zasady i proces zaopatrzenia wraz z warunkami gwarancji i programem pogwarancyjnym.

Nie pobieramy opłat od naszych klientów, którzy dbają o stan zakupionego sprzętu i stosują się do naszych zaleceń zawartych w instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej. Część podzespołów w protezie ulega naturalnemu zużyciu i ze względów bezpieczeństwa oraz higieny, należy je wymienić. Stosując sprawdzone i wyselekcjonowane materiały, dążymy do minimalizacji kosztów pracy i części zamiennych.

Jeśli podróżujesz na dłużej zagranicę, skontaktuj się z nami, podpowiemy, o co musisz zadbać.

W razie pytań, jesteśmy do dyspozycji

Pozdrawiamy

Szymon Janicki
mgr rehabilitacji ruchowej
mistrz technik ortopeda

Mariusz Andrzejewski
mistrz technik ortopeda

Orto Partner
Rozwiązania dla mobilności

Adres pracowni ortopedycznej: ul. Gdyńska 19, 62-004 Czerwonak,
Tel/fax. 061 812 01 03, kom. 608 65 60 60, 609 660 191
e-mail: info@ortpartner.pl www.ortopartner.pl